

El material no tejido de la mascarilla es el grafeno de biomasa Healfiber® del Shengquan Group. El grafeno de biomasa es un nuevo material funcional basado en carbono que contiene grafeno monocapa y multicapa, fabricado mediante la cabonización catalítica a alta temperatura de celulosa obtenida a partir de residuos de maíz.

INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN

1. El incumplimiento de todas las instrucciones y limitaciones puede afectar considerablemente a la eficacia de esta mascarilla de partículas y causar patologías, lesiones e incluso la muerte.
2. Es esencial seleccionar la mascarilla adecuada. Antes de su uso en el lugar de trabajo, el usuario debe ser instruido por la empresa en el uso correcto de la mascarilla de conformidad con la normativa de seguridad y salud vigente.
3. Esta mascarilla de partículas no suministra oxígeno. Utilícese únicamente en áreas bien ventiladas donde haya suficiente oxígeno para permitir la vida.
4. Deseche la mascarilla y sustitúyala por una nueva si:
 - a) una obstrucción excesiva de la mascarilla de partículas dificulta la respiración.
 - b) la mascarilla de partículas sufre daños.
5. Si presentara mareos, irritaciones o cualquier otro malestar, quítese la mascarilla.
6. Guarde la mascarilla filtrante de partículas en un lugar limpio y seco siguiendo las indicaciones del fabricante (véanse los pictogramas).

COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LA MASCARILLA

1. Coloque la mascarilla contra la cara y presione el clip nasal contra el puente nasal para asegurar la hermeticidad.
2. Sujete la mascarilla de partículas sobre la nariz y la boca y coloque las cintas detrás de las orejas.
3. Si las cintas fueran demasiado largas para ajustar la mascarilla adecuadamente, estas pueden acortarse insertándolas en los tubitos de plástico incluidos.

4. Con ambas manos, ajuste el clip nasal a la forma del puente nasal. A continuación, ajuste las cintas para garantizar un sellado facial absoluto.
5. Comprobación del ajuste:
 - a) Para comprobar la debida colocación de la mascarilla de partículas sin válvula de respiración, sujete la mascarilla con ambas manos e inhale con fuerza.
 - b) Si percibe una corriente de aire en torno a la nariz, vuelva a ajustar el clip nasal o apriétele bien.
 - c) Si percibe una corriente de aire en los bordes de la mascarilla, recolocó la mascarilla o las cintas para conseguir un mejor ajuste.
6. Retirada de la mascarilla: Procure no tocar la cara exterior de la mascarilla con las manos. La mascarilla debe retirarse soltando las cintas y tocando la cara interior.

Sustituya la mascarilla de inmediato si respirar se vuelve difícil o la mascarilla está dañada o deformada.

Sustituya la mascarilla si no es posible conseguir el debido sellado facial. Seguir cuidadosamente las indicaciones anteriores es un paso importante para el uso seguro de la mascarilla.

Colocación de la mascarilla ...



... retirada de la mascarilla



LIMITACIONES DE USO

1. No utilice la mascarilla en las condiciones siguientes, y no entre en las zonas contaminadas:
 - a) La atmósfera contiene menos de un 19,5 % de oxígeno.
 - b) Si percibe olores o sabores de impurezas.
 - c) Con fines de protección frente a gases o vapores.

d) Se desconocen las contaminaciones y sus concentraciones o estas son potencialmente mortales o nocivas para la salud.


e) Para arenado, pulverización y asbesto.

f) En atmósferas potencialmente explosivas.

2. No modifique ni haga un uso inadecuado de la mascarilla.
3. No utilice la mascarilla de partículas con barba o patillas o en otras condiciones que puedan impedir un buen sellado, de forma que se cumplan los requisitos de hermeticidad.
4. Antes de cada uso, la mascarilla debe someterse a una inspección visual para comprobar que no presenta daño alguno.
5. Esta mascarilla protege contra determinadas contaminaciones por partículas, pero no elimina el riesgo o contagio de enfermedades o infecciones. El uso incorrecto de la misma puede provocar enfermedades o la muerte.
6. Esta mascarilla de partículas con la indicación «NR» no debe utilizarse durante más de un turno de trabajo.
7. Esta mascarilla de partículas no es apta para usuarios con lesiones en las orejas.
8. **Periodo de uso recomendado: Entre 4 y 8 horas.**
9. Observe la normativa 112-190 de la DGUV.
10. En caso de uso industrial, consulte al médico de la empresa.

ELIMINACIÓN

1. Esta mascarilla debe desecharse junto con los residuos mixtos.
2. Las mascarillas contaminadas (por ejemplo, por tuberculosis o Covid) deberán desecharse siguiendo la normativa sanitaria pertinente.

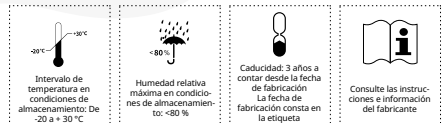

EE. UU.

Empresa: SQ Medical Supplies Inc.

Dirección: 1001 S Lawson St, Stadt der Industrie, CA 91748 (Estados Unidos)

Persona de contacto: Fred Bai **Teléfono de atención al cliente:** 1-888-912-8168

Correo electrónico: info@sqmedicalsupplies.com

ALEMANIA

Empresa: SQ Deutschland GmbH

Dirección: Gutenbergstraße 6, 34466 Wolfhagen (Alemania)

Correo electrónico: masken@sq-deutschland.com

Teléfono de atención al cliente: +49 (0)5692 99707-0

ESPAÑA

Empresa: SQ Insertec Europe, S. L.

Dirección: C/ La Bureba 2, 09007 Burgos (España)

Persona de contacto: Shuli Shen **Teléfono de atención al cliente:** (+34)947 07 6153

POLONIA

Empresa: SQ Polska Sp. Zo.0o.

Dirección: ul. Stoneczna 43, 32-050 Skawina (Polonia)

Persona de contacto: Wojciech Milc **Teléfono de atención al cliente:** 0048 (12) 256-04-26

RUSIA

Empresa: The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies LLC

Dirección: B. Sampsonievsky Pr., D.45, Lit. A, 194044, San Petersburgo (Rusia)

Persona de contacto: Mikhail Lavrentyev

Teléfono de atención al cliente: +7 (812) 401-69-00, +7 (812) 647-92-00

BRASIL

Empresa: SQ do Brasil Comercialização de Produtos Químicos Ltd.

Dirección: Rua Fiação da Saúde, 145 Conjunto 48, São Paulo-SP (Brasil)

Persona de contacto: Daniel Vidal **Teléfono de atención al cliente:** +55-11-974604748

INDIA

Empresa: SQ Enterprises Private Limited

Dirección: No. 6/60-2, Sylvan Gardens, G. N. Mills Post, Coimbatore-641 029 (India)

Persona de contacto: Regith Gopinath **Teléfono de atención al cliente:** +91-9789185555

AUSTRALIA

Empresa: HIGH-TECH PTY LTD

Dirección: U109, 7 Hoyle Ave, Castle Hill, NSW 2154 (Australia)

Persona de contacto: Elaine Meng **Teléfono de atención al cliente:** +61 481265768

CE 2834

DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

La declaración CE de conformidad puede descargarse en la siguiente página web: <http://e.shengquan.com>, www.sq-deutschland.com/masken.html

La mascarilla filtrante de partículas es conforme con el Reglamento (UE) 2016/425 y dispone del respectivo marcado CE. Fue testada según las normas DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR. Organismo de certificación CE: CCQS Certification Services Limited, Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublín 15, D15 AKK1 (Irlanda) (NB 2834).

[Fabricante]: Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd.

[Dirección]: Diaozhen Industrial Development Zone, distrito Zhangqiu de Jinan, Shandong (China)

[Teléfono de atención al cliente]: 0086-400-777-8118

[Correo electrónico]: sq.ppe@shengquan.com

[Página web]: www.shengquan.com

[Importador]: SQ Deutschland GmbH

Gutenbergstraße 6, 34466 Wolfhagen (Alemania)

www.sq-deutschland.com



FFP2 MASCARILLA FILTRANTE DE PARTÍCULAS

CE 2834 DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

Ref. SNN70369B

INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN

Lea estas instrucciones detenidamente antes de utilizar la mascarilla.