

Le matériau feutré gris dans le masque est le graphène de biomasse Healfiber® du groupe Shengquan Group. Il s'agit d'un nouveau matériau fonctionnel carboné contenant du graphène monocouche et multicouche obtenus par décomposition catalytique à haute température d'un gaz carboné à partir de cellulose d'épis de maïs.

MANUEL D'UTILISATION ET INFORMATIONS

1. Le non-respect de toutes les instructions et restrictions peut entraver considérablement l'efficacité du demi-masque à particules et entraîner des maladies ou des blessures graves, voire mortelles.
2. Il faut absolument choisir un masque approprié. Avant d'utiliser le masque sur son poste de travail, le porteur doit être formé par son employeur sur l'utilisation correcte du masque en relation avec les normes applicables de sécurité et de santé.
3. Le présent demi-masque à particules ne délivre pas d'oxygène. N'utiliser que dans des zones correctement aérées contenant suffisamment d'oxygène pour permettre la survie.
4. Le masque doit être mis au rebut et remplacé par un masque neuf dans les cas suivants :
 - a) un bouchage trop important du demi-masque à particules entraîne des problèmes respiratoires
 - b) le demi-masque à particules est endommagé.
5. Retirez le demi-masque si vous ressentez des vertiges, des démangeaisons ou autres gênes.
6. Stockez le demi-masque à particules proprement et au sec selon les indications du fabricant (voir les pictogrammes).

METTRE ET RETIRER LE MASQUE

1. Placez le masque sur votre visage et fixez le joint nasal en appuyant autour de votre nez afin de garantir l'étanchéité.
2. En maintenant le demi-masque à particules sur votre nez et votre bouche, tirez la bride derrière vos oreilles.
3. Si le masque ne s'ajuste pas bien parce que les brides pour oreilles sont trop longues, vous pouvez les raccourcir en enfilant dessus les petits tubes de plastique fournis. Réglez avec vos deux mains le clip nasal et courbez-le vers l'intérieur pour un bon ajustement.

4. Réglez ensuite la bride pour oreilles afin d'assurer une étanchéité positive autour de votre visage.
5. Contrôle de l'ajustement :
 - a) afin de vérifier l'ajustement du demi-masque à particules sans valve d'expiration, placez vos deux mains sur le masque et inspirez à fond.
 - b) si vous sentez un flux d'air dans la zone du nez, réglez à nouveau le clip nasal ou resserrez-le.
 - c) si vous sentez un flux d'air sur les bords du masque, repositionnez le masque ou la bride pour oreilles afin de rectifier l'ajustement.
6. Retrait du masque : Faites attention de ne pas saisir l'extérieur du masque avec les mains. Le retrait du masque doit toujours être fait en retirant les brides pour oreilles et en saisissant l'intérieur du masque.

Changez de masque dès que vous avez des difficultés à respirer, ou si le masque est endommagé ou écrasé.

Changez de masque si vous ne pouvez pas obtenir une étanchéité satisfaisante autour de votre visage.

Le respect attentif des présentes instructions est une étape indispensable pour une utilisation du masque en toute sécurité.

Mettre le masque ...



... L'enlever




LIMITES D'UTILISATION

1. Ne pénétrez pas dans des zones contaminées et n'utilisez pas le masque dans les conditions suivantes :
 - a) l'atmosphère contient moins de 19,5 % d'oxygène
 - b) vous sentez ou goûtez des impuretés
 - c) pour la protection contre des gaz ou des fumées

- d) les contaminations ou leur concentration ne sont pas connues ou menacent directement la santé ou la vie
 - e) pour la protection dans des travaux de sablage, de vaporisation ou avec de l'amiante
 - f) dans des zones à risque d'explosion
2. Ne modifiez pas votre masque et n'en faites pas une utilisation abusive.
 3. Afin que les exigences d'étanchéité soient remplies, n'utilisez pas le demi-masque à particules en cas de pilosité du visage ou dans d'autres circonstances empêchant une bonne étanchéité.
 4. Avant chaque utilisation, vérifiez que votre masque n'est pas endommagé.
 5. Le présent masque protège contre certaines impuretés sous forme de particules mais ne protège pas contre le risque ou la contamination par des maladies ou des infections. Une mauvaise utilisation peut entraîner des maladies ou être mortelle.
 6. Le présent demi-masque à particules jetable « NR » ne doit pas être porté plus longtemps que le temps d'une équipe.
 7. Le présent demi-masque à particules ne convient pas à des utilisateurs ayant des lésions au niveau des oreilles.
 8. **Durée d'utilisation conseillée : Entre 4 et 8 heures.**
 9. Veuillez respecter le règlement 112-190 de l'assurance accident légale allemande (DGUV).
 10. En cas d'utilisation dans l'industrie, se concerter avec le médecin d'entreprise.

ÉLIMINATION

1. Le masque doit être éliminé avec les déchets résiduels non recyclables.
2. Les masques contaminés (par ex. avec la tuberculose ou la Covid) doivent être éliminés selon les règles d'hygiène applicables.

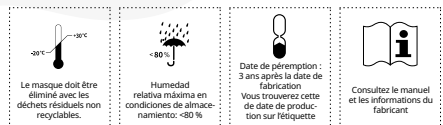

USA

Entreprise : SQ Medical Supplies Inc.
Adresse : 1001 S Lawson St, Stadt der Industrie, CA 91748 États Unis
Contact : Fred Bai **Hotline SAV :** 1-888-912-8168
Courriel : info@sqmedicalsupplies.com

ALLEMAGNE

Entreprise : SQ Deutschland GmbH
Adresse : Gutenbergstraße 6, 34466 Wolfhagen / Allemagne
Courriel : masken@sq-deutschland.com **Hotline SAV :** +49 (0)5692 99707-0

ESPAGNE

Entreprise : SQ Inserter Europe, S. L.
Adresse : C/ La Bureba 2, 09007 Burgos-Espagne
Contact : Shuli Shen **Hotline SAV :** (+34)947 07 6153

POLOGNE

Entreprise : SQ Polska Sp. Zo.0o.
Adresse : ul. Stoneczna 43, 32-050 Skawina, POLEN
Contact : Wojciech Milc **Hotline SAV :** 0048 (12) 256-04-26

RUSSIE

Entreprise : The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies LLC
Adresse : B. Sampsonievsky Pr., D.45, Lit. A, 194044, St. Petersburg, RUSSIE
Contact : Mikhail Lavrentyev **Hotline SAV :** +7 (812) 401-69-00, +7 (812) 647-92-00

BRÉSIL

Entreprise : SQ do Brasil Comercialização de Produtos Químicos Ltd.
Adresse : Rua Fiação da Saúde, 145 Conjunto 48, São Paulo-SP, Brésil
Contact : Daniel Vidal **Hotline SAV :** +55-11-974604748

INDE

Entreprise : SQ Enterprises Private Limited
Adresse : No. 6/60-2, Sylvan Gardens, G. N. Mills Post, Coimbatore-641 029, Inde
Contact : Regith Gopinath **Hotline SAV :** +91-9789185555

AUSTRALIE

Entreprise : HIGH-TECH PTY LTD
Adresse : U109, 7 Hoyle Ave, Castle Hill, NSW 2154 Australie
Contact : Elaine Meng
Hotline SAV : +61 481265768

CE 2834

DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

La déclaration de conformité UE peut être téléchargée sur le site internet suivant : <http://e.shengquan.com>, www.sq-deutschland.com/masken.html

Les demi-masques filtrants pour particules sont conformes au Règlement (UE) 2016/425 et sont munis du marquage CE correspondant. Ils ont été contrôlés en conformité avec la norme DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR. Organisme de certification CE : CCQS Certification Services Limited, Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irlande (NB 2834).

[Fabricant] : Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd.

[Adresse] : Diaozhen Industrial Development Zone, Zhangqiu, Jinan, Chine

[Hotline SAV] : 0086-400-777-8118

[Courriel] : sq.ppe@shengquan.com

[Site internet] : www.shengquan.com

[Importateur] : SQ Deutschland GmbH

Gutenbergstraße 6, 34466 Wolfhagen / Allemagne

www.sq-deutschland.com



FFP2 DEMI-MASQUE FILTRANT LES PARTICULES

CE 2834 DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

Réf. art. SNN70369B

MANUEL D'UTILISATION ET INFORMATIONS

Veuillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.